

# Operationsrockar- Cobes

## Bruksanvisning för sterila operationsrockar

### Rekommenderad påklädningsordning för sterila skyddskläder

Steg 1–3 utförs före kirurgisk handtvätt eller desinfektion.

1. Skydda håret och all behåring på ansiktsområdet (mössa och/eller hjälm).
2. Ta på mask eller andningsskydd.
3. Ta på skyddsglasögon (skyddsglasögon med sidovisir, ansiktsvisir, eller ibland är ansiktsmasken försedd med visir).
4. Ta på den sterila operationsrocken.
5. Ta på de sterila operationshandskarna.

### Att ta på operationsrocken

Kontrollera uppgifterna på förpackningen före användning och observera tillverkningsdatum och giltighetstid.

Syftet med operationsrocken är att skydda operationssåret mot kontaminering orsakad av den kirurgiska personalen och att skydda den kirurgiska personalen mot kontaminering orsakad av blod och andra utsöndringar.

Ta fram den sterila skyddsrocken och flytta dig till ett område där rocken är skyddad mot kontaminering och utför följande steg:

1. Lägg båda händerna i armhålen. Håll upp rocken framför dig och låt den veckla ut sig helt och hållet.
2. Placera båda händerna och armarna i armhålen och i ärmarna. Håll händerna borta från kroppen.
3. Om du tar på dig handskarna med öppen teknik, dra resåren till tummen. / Om du tar på dig handskarna med stängd teknik, skjut händerna fram till kanten på resåren.
4. Den assisterande skötaren ska dra rocken över axlarna. Det är endast tillåtet att röra insidan av rocken.
5. Placera banden på sina platser.
6. Knyt rockens inre band.
7. Efter att du tagit på dig handskarna, ta tag i överräckningsbrickan med båda händerna, avskilj det vänstra yttre bandet från överräckningsbrickan och håll bandet i vänstra handen.
8. Räck överräckningsbrickan till den assisterande sjukskötaren och vrid dig sedan tre fjärdedels varv åt vänster medan den assisterande sjukskötaren sträcker ut det yttre bandet till full längd.
9. Ta fram änden på det yttre bandet genom att dra fram den ur överräckningsbrickan som den assisterande skötaren håller i, och knyt ihop den med den vänstra änden av det yttre bandet.

### Att ta av operationsrocken

Handskarna och rocken ska tas av på ett särskilt sätt så att kläderna, armarna och händerna skyddas från små partiklar som finns på ytan av de nedsmutsade rockarna och handskarna.

1. Börja med att ta av den första överdragshandsken och lägg den i soporna.
2. Fortsätt med att ta av den andra överdragshandsken och lägg den i soporna.
3. Ta tag i rocken vid axeln – öppna skyddsrocken.
4. Dra kragen och ärmarna framåt och ut ur handskarna. Vänd operationsrocken och handskarnas öppningar ut och in.
5. Håll armarna och rocken långt borta från kroppen då du vänder rocken ut och in till ett knyte och lägger den i soporna.
6. Ta av den första handsken genom att ta tag i den aviga resåren och vända handsken ut och in. Ta sedan med den bara handen tag i insidan av resåren på den andra handsken och avlägsna handsken genom att vända den ut och in. Lägg handskarna i soporna och desinficera dina händer.

### Anmärkningar och varningar

Denna produkt är för engångsbruk. Produkten får inte underhållas eller rengöras på något sätt. En avklädd rock får inte användas igen. Relevant avfallshantering efter användning måste utföras i enlighet med relevanta lagar och föreskrifter för medicinska institutioner eller miljöskyddsavdelningar. Materialen kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa användare.

**Tillverkningsdatum och partinummer:** Se operationsrockens stämpel.

**Livslängd:** 3 år från tillverkningsdagen.

**Förvaring och transport:** Produkten ska förvaras i en torr och luftkonditionerad miljö. Under transport ska produkten skyddas från kraftigt tryck, direkt solljus samt från regn och snö.

**Intyg om överensstämmelse:** <https://medicalfinland.fi/kirurginen-suojakaapu/>

**Importör:** MedMedi Oy, Örtagårdsvägen 22, 00740 Helsingfors. Tfn +358 40 591 3927

**Tillverkare:** Cobes Industries (JinZhai) Co., Ltd. Peasant-worker Pioneer park Baitafan town Jinzhai county, 237322 Luan, Anhui, Peoples Republic Of China

# Leikkaustakit - Cobes

## Steriilien laikkaustakkien käyttöohjeet

### **Suositus steriilien suojavaatteiden pukemisjärjestykseksi**

Kohdat 1-3 suoritetaan ennen kirurgista käsien pesua tai desinfektiota.

1. Suojaa hiukset ja kaikki kasvojen alueen karvoitus (myssy ja/tai kypärä)
2. Pue maski tai hengityssuojain
3. Pue suojalasit (suojalasit sivuviisireillä, kasvoviisiiri, tai joskus kasvomaskissa on mukana visiiri)
4. Pue steriili leikkaustakki
5. Pue steriilit leikkauskäsineet

### **Leikkaustakin pukeminen**

Tarkista pakkaustiedot ennen käyttöä ja kiinnitä huomiota valmistuspäivään, voimassaoloaikaan.

Leikkaustakin tarkoitus on suojata leikkaushaavaa kirurgisen henkilökunnan aiheuttamalta kontaminaatiolta ja suojata kirurgista henkilökuntaa veren ja muiden eritteiden aiheuttamalta kontaminaatiolta.

Ota steriili suojatakki esille ja siirry alueelle, jossa takki on suojassa kontaminaatiolta ja suorita seuraavat vaiheet:

1. Laita molemmat kädet käsivarsireikiin. Kannattele takkia edessä ja anna sen avautua kokonaan.
2. Aseta molemmat kädet ja käsivarret käsivarsireikiin sekä hihoihin. Pidä kädet irti vartalosta.
3. Jos puuet käsineet avoimella tekniikalla, vedäresori peukalon tasolle / Jos puuet suljetulla tekniikalla, työnnä kädet resorin reunaan asti
4. Avustavan hoitajan tulee vetää takki olkapäiden yli. Vain takin sisäpuoleen koskeminen sallittua.
5. Aseta kiinnitysvyöt paikoilleen.
6. Sido takin vyö.
7. Käsineiden pukemisen jälkeen ota kiinni vyökorttiin molemmilla käsillä, erota vasen ulompi vyövyökortista ja pidä vyötä vasemmassa kädessä.
8. Ojenna vyökortti avustavalle sairaanhoitajalle ja tee sitten kolmen neljäsosan kierros vasemmalle, kun avustava sairaanhoitaja ojentaa ulomman vyön täyteen pituuteensa.
9. Ota ulomman vyön pää esiin vetämällä se ulos avustavan hoitajan kiinni pitämästä vyökortista, ja solmi se yhteen ulomman vyön vasemmanpuoleisen päään kanssa.

### **Leikkaustakin riisuminen**

Käsineet ja takki on riisuttava tietyllä tavalla, jotta vaatteet, käsivarret ja kädet suojataan likaantuneiden takkien ja käsineiden ulkopinnalla olevilta pienhiukkasilta.

1. Aloita riisumalla ensimmäinen päällyskäsine ja laita roskeen
2. Jatka riisumalla toinen päällyskäsine ja laita se roskeen
3. Ota takista kiinni hartian kohdalta – avaa suojatakki
4. Vedä kaulus ja hihat eteenpäin ja ulos käsineistä. Käännä leikkaustakki ja käsineiden hihansuut nurinpäin.
5. Pidä kädet ja takki kaukana kehosta, kun käännät takin nurinpäin nyytiksi ja laitat sen roskeen
6. Riisu ensimmäinen käsine ottamalla kiinni käännetyistä resorista ja kääntämällä käsine nurinpäin. Tartu sitten paljaalla kädellä toisen käsineen resorin sisäpintaan ja poista käsine kääntämällä se nurinpäin. Laita käsineet roskeen ja desinfioi kädet.

### **Huomautukset ja varoitukset**

Tämä tuote on kertakäyttöinen. Ei saa huoltaa tai puhdistaa millään tavoin. Riisuttua takkia ei saa käyttää uudelleen. Asiaankuuluva jätteiden käsittely käytön jälkeen on suoritettava lääketieteellisten laitosten tai ympäristönsuojeluosastojen asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti. Materiaalit voivat aiheuttaa allergisen reaktion joillekin käyttäjille.

**Valmistuspäivämäärä ja eränumero:** Katso leikkaustakin leimasta.

**Käyttöikä:** 3 Vuotta valmistuspäivästä.

**Varastointi ja kuljetus:** Tuote tulee varastoida kuivassa ja ilmastoidussa ympäristössä. Kuljetuksen aikana tuote on suojattava voimakkaalta paineelta, suoralta auringonvalolta sekä sateelta ja lumelta.

**Vaatumuksen mukaisuustodistus:** <https://medicalfinland.fi/kirurginen-suojakaapu/>

**Maahantuoja:** MedMedi Oy, Yrttimaantie 22 00740 Helsinki. Puh. +358 40 5913927

**Valmistaja:** Cobes Industries (JinZhai) Co., Ltd. Peasant-worker Pioneer park Baitafan town Jinzhai county, 237322 Luan, Anhui, Peoples Republic Of China