

XIQUE KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN FFP2 NR

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön. Ei steriili.

Tuotteen nimi: LK-Z1510 FFP2 NR -hengityksensuojain. Ei steriili.

Kuvaus: Hengityksensuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista tekstiileistä.

Suojaintyyppi: Kertakäyttöinen hengityksensuojain.

Määrä: 10 kpl/pakkaus.

Sovellettu standardi: (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009, FFP2.

Valmistuspäivämäärä: Katso tuotepakkauksesta.

Säilytysaika: Kolme vuotta valmistuspäivämäärästä.

PPE Kategoria: III

Varoitus

1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristöissä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta, eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovauksen jne. aikana).
3. Hengityksensuojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä.
4. Käyttöohjeiden vastainen käyttö voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kolmen vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä.
6. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
7. Materiaalit voivat aiheuttaa herkkäihoisille allergisen reaktion

Huomaa

1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saastuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda hengityksensuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vaikeaa.

Säilytys

1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys -20–38 °C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa < 80 %.

Testaaja

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (2163). Testattu ja CE-hyväksytty standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti. Sertifikaatin numero: 2163-PPE-825.

Käyttöohjeet

1. Tarkista onko maski ja yksittäispakkaus ehjä.
1. Pese kädet hyvin ja avaa hengityksensuojain.
2. Peitä kasvat, korvat ja leuka.
3. Aseta lenkit korvien taakse.
4. Muotoile molemmin käsin tiiviisti kasvoja vasten.
5. Käytön jälkeen poista hengityksensuojain kasvoilta puhdistetuilla käsin tarttumalla sen nauhoihin. Älä koske hengityksensuojaimen ulkopintaan. Laita kertakäyttöinen hengityksensuojain roskeen käyttöön jälkeen. Pese tai desinfioi kädet hengityksensuojaimen poistamisen jälkeen.

Valmistaja

Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd. Address: Qingcao Industrial Park, Tongcheng, Anqing City, Anhui Province. 6 971044 293892. Valmistettu Kiinassa. Puh. +8651085552839.

Maahantuoja

MedMedi Oy, Yrtimeantie 22 00740 Helsinki. Puh +358 40 5913927

Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuustodistukset suomeksi ja ruotsiksi ovat nähtävissä internet sivulla:

<http://medicalfinland.fi/xique-kertakayttoinen-hengityksensuojain-taso-ffp2-musta/>

Pakkauksen merkinnät

FFP2 NR

FFP2 = Suojaustaso
NR = Kertakäyttöinen

CE 2163

CE = CE merkintä
2163 = Ilmoittava laitos



Lue ohjeet



Varastointi
lämpötila



Varastointi
ilman kosteus
alle 80%



Pakkaus voi-
daan kierrättää



Hävitä tuote
sekajätteessä

XIQUE ENGÅNGSANDNINGSSKYDD FFP2 NR

Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej steril.

Produktnamn: LK-Z1510 FFP2 NR-andningsskydd. Ej sterilt.

Beskrivning: Andningsskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältblåst tyg.

Typ av andningsskydd: Andningsskydd för engångsbruk.

Kvantitet: 1 st./förpackning.

Tillämpad standard: (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009, FFP2.

Tillverkningsdatum: Se datum på förpackning.

Förvaringstid: Tre år från tillverkningsdatumet.

PPE Kategori: III

Varningar

1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
3. Användning av andningsskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
4. Underlåtenhet att använda och underhålla produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.
5. Använd produkten inom tre år från tillverkningsdatumet.
6. Använd inte om förpackningen är skadad.
7. Material som är i kontakt med användarens hud kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga användare.

Observera

1. Kontrollera andningsskyddets utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märke till skador, oljefläckar eller lukter.
2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämna det kontaminerade området genast.
3. Byt genast ut andningsskyddet mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas.

Förvaring:

1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20–38 °C med en relativ luftfuktighet på < 80 %.

Testlaboratorium

Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. NB 2163. Testad och CE-certifierad enligt standarden EN 149:2001+A1:2009. Certifikatnummer: 2163-PPE-825

Bruksanvisning

1. Tvätta händerna och öppna andningsskyddet.
2. Täck hakan, munnen och näsan.
3. Trä banden bakom öronen.
4. Pressa tätt ner mot näsbågen med båda händerna.
5. Efter användning, ta bort andningsskyddet med rengjorda händer genom att ta tag i öronbanden. Rör inte vid skyddets utsida. Släng engångsskyddet i soporna efter användning. Tvätta eller desinficera händerna efter att du har tagit bort andningsskyddet.

Tillverkare

Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd. Address: Qingcao Industrial Park, Tongcheng, Anqing City, Anhui Province. 6 971044 293892. Valmistettu Kiinassa. Puh. +8651085552839.

Import och marknadsföring

MedMedi Oy, Yrtimeantie 22 00740 Helsinki. Puh +358 40 5913927

Produktens EU-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska kan läsas på webbplatsen:

<http://medicalfinland.fi/xique-kertakayttoinen-hengityksensuojain-taso-ffp2-musta/>

Förpackningsmarkeringar

FFP2 NR

FFP2 = Skyddsnivå
NR = Engångsskydd

CE 2163

CE = ce märkt
2163 = Anmälande
organ



Läs handboken



Förvarings
temperatur



Förvaring
luftfuktighet
på < 80 %.



Förpackningen
kan återvinnas



Kasta produkten
med blandat
avfall