

## Anzhizi kirurginen suu- ja nenäsuoja, type IIR

Käyttötarkoitus: estää tartunnanaiheuttajien siirtyminen henkilökunnalta potilaille kliinissä olosuhteissa. Vain kertakäyttöön.

Tuotteen nimi: Anzhizi kirurginen suu- ja nenäsuoja. Ei steriili.

Kuvaus: hengityksensuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulatetuista teksteileistä.

Suojaintyyppi: type IIR, korvalenkeillä, koko 17.8cm x 9.5cm

Määrä: 50 kpl/pakkaus.

Sovellettu standardi: 93/42/EEC lääkinnälliset laitteet. EN14683:2019+AC:2019

MDD Kategoria: luokka 1

Valmistuspäivämäärä: katso tuotepakkauksesta. Säilytysaika: 18kk.

Testi	BFE%	Paine-ero Pa/cm <sup>2</sup>	Roiskesuoja (kPa)	Mikrobiologinen puhtaus
Tulos	≥ 98%	<60	≥16.0	≤30

### Varoitus

1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristöissä, joissa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta, eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovuoksen jne. aikana).
3. Käyttö ei poista tartuntariskiä.
4. Käyttöohjeiden vastainen käyttö voi johtaa sairauteen.
5. Käytä tuote kolmen vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä.
6. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
7. Materiaalit voivat aiheuttaa herkkäihoisille allergisen reaktion

### Huomaa

1. Tarkista suojan ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat vaurioita, öljytahroja tai hajuja.
2. Jos koet hengenahdistusta, huimausta tai muuta epämukavuutta, poistu saastuneelta alueelta välittömästi.
3. Vaihda tuote heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vaikeaa.

### Säilytys

1. Varastoitava asianmukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, auringonpaistetta ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa.
3. Säilytys 10–38 °C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa < 80 %.

### Käyttöohjeet

1. Tarkista onko suu- ja nenäsuoja sekä yksittäispakkaus ehjä.
1. Pese kädet hyvin ja avaa tuote.
2. Peitä kasvat, korvat ja leuka.
3. Aseta lenkit korvien taakse.
4. Muotoile molemmin käsin tiiviisti kasvoja vasten.
5. Käytön jälkeen poista tuote kasvoilta puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoihin. Älä koske tuotteen ulkopintaan. Laita kertakäyttöinen tuote roskeen käyttöön jälkeen. Pese tai desinfioi kädet tuotteen poistamisen jälkeen.

### Valmistaja

Wuyishan Jiean Medical Device Manufactu.ring Co., Ltd

Xianan Road Ecological Business Park,Wuyishan City, Fujian P.R., China

Puhelinnumero: 086-599-5130888

### EU edustaja

MedPath GmbH, Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

DIMID code: DE/0000047823 Tel:+ 49 ( 0) 89 189174474 Fax: +49(0)8954858884

Mail: info@medpath.pro

### Maahantuojaja

MedMedi Oy

Yrttimaantie 22 00740 Helsinki.


P. +358 40 5913927 Ma-Pe klo 9-16.

www.medicalfinland.fi, info@medicalfinland.fi

Tuotteen EU-vaatimustenmukaisuustodistukset suomeksi ja ruotsiksi ovat nähtävissä internet sivulla:

<http://medicalfinland.fi/kirurgiset-suu-ja-nenasuojat/>

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä

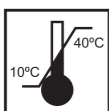

## Kirurgisk mun- och nässkydd för engångsbruk, typ IIR

Avsedd användning: förhindra överföring av smittämnen från personal till patienter i kliniska miljöer Ej sterilt.

Produktnamn: kirurgisk mun- och nässkydd för engångsbruk. Ej sterilt.

Beskrivning: produktet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältbläst tyg.

Typ av skydd: type IIR med öronband, storlek 17.8cm x 9.5cm.

Kvantitet: 50 st./förpackning.

Tillämpad standard: 93/42 / EEC medicinsk utrustning. EN14683:2019+AC:2019

MDD Kategori: Klass 1

Tillverkningsdatum: Se datum på förpackning, förvaringstid: 18 mån. från tillverkningsdatumet.

Test	BFE%	Differenstryck (Pa/cm <sup>2</sup> )	Stänkmotstånd-stryck (kPa)	Mikrobiologisk renhet
Resultat	≥ 98%	<60	≥16.0	≤30

### Varningar

1. Produkten bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten.
2. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.).
3. Användning eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom eller infektion.
4. Underlåtenhet att använda och underhålla produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom.
5. Använd produkten inom tre år från tillverkningsdatumet.
6. Använd inte om förpackningen är skadad.
7. Material som är i kontakt med användarens hud kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga användare.

### Observera

1. Kontrollera utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märke till skador, oljefläckar eller lukter.
2. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämna det kontaminerade området genast.
3. Byt genast ut mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas.

### Förvaring:

1. Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden.
2. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solsken och kontakt med frätande kemikalier.
3. Vi rekommenderar att produkten förvaras i 10–38 °C med en relativ luftfuktighet på < 80 %.

### Bruksanvisning

1. Tvätta händerna och öppna skyddet.
2. Täck hakan, munnen och näsan.
3. Trä banden bakom öronen.
4. Pressa tätt ner mot näsbågen med båda händerna.
5. Efter användning, ta bort skyddet med rengjorda händer genom att ta tag i öronbanden. Rör inte vid skyddets utsida. Släng engångsskyddet i soporna efter användning. Tvätta eller desinficera händerna efter att produkten har tagits bort.

### Tillverkare

Wuyishan Jiean Medical Device Manufactu.ring Co., Ltd

Xianan Road Ecological Business Park,Wuyishan City, Fujian P.R., China

Tel: 086-599-5130888

### EU -representant

MedPath GmbH, Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

DIMID code: DE/0000047823 Tel:+ 49 ( 0) 89 189174474 Fax: +49(0)8954858884

Mail: info@medpath.pro

### Import och marknadsföring

MedMedi Oy

Yrttimaantie 22 00740 Helsinki.

Tel. +358 40 5913927 Ma-Pe klo 9-16.

www.medicalfinland.fi, info@medicalfinland.fi

Produktens EU-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska kan läsas på webbplatsen:

<http://medicalfinland.fi/kirurgiset-suu-ja-nenasuojat/>

Läs bruksanvisningen innan användning

